

平成26年3月31日

お得意様各位

株式会社 シケン

CAD/CAM 冠に関するお願い

拝啓 時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、4月1日より、CAD/CAM 冠が保険適用になります。つきましては、CAD/CAM 冠に関するご案内とお願いをさせていただきますので、ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

《ブロックについて》

現在、弊社では、(株)ジーシーAadva Mill 用ブロック「セラスマート」のみの取り扱いしかございません。(色調：A2LT・A3LT・A3.5LT)


※ブロック（材料）の許認可は4月10日（厚生省通達）

今後、セレック用および他社のブロックが保険適用となった場合、随時対応させていただきますが、その際は改めてご案内いたします。

《支台歯形成について》

(株)ジーシー様推奨の形成量はございますが、弊社では、マージン部「1.0mm」咬合面中心溝（クリアランス）で「1.3mm」以上を強度保証の対象とさせていただきます。(保証期間は半年間)

- ・マージン部形成量が少ない場合、オーバーカウントゥアーにさせていただきます。
- ・咬合面クリアランスが少ない場合、裂溝を浅く、展開角を大きくさせていただきます。

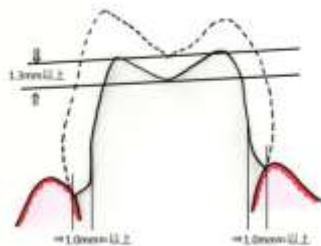

《使用セメントについて》

形成量にもよりますが、メタル支台によるレジンセメントの透過性が影響されると想定しますので、オペーク効果のある色の選択をお願いします。

*(株)ジーシー ジーセムリンクエース「AO3」を推奨 (他に「TL」「A2」)

*(株)松風 レジセム「オペーク」を推奨 (他に「クリア」「アイボリー」)

*使用方法については、各社レジンセメントのマニュアルに従ってください

※必ずCAD/CAM冠内面にプライマーを塗布して下さい。破折可能性あり

(株)ジーシー「セラミックプライマーII」

(株)松風「ポーセレンプライマー」

《再製について》

下記条件下での再製作ご希望の場合は、技工料・材料代の再製料金を請求させていただきます。

① 支台歯形成がCAD/CAM製作に適合しない場合

- ・支台歯（生活歯）での1mm以下の形成量（クリアランス）
- ・マージン不鮮明、支台の鋭角90度以下、ナイフエッジ、ジャンプマージン（遊離エナメル）

原則、支台歯の再形成をお願いすることとなりますが、そのまま製作をご希望され結果として破折等が生じた場合は、有償となります。

これらの場合は、製作前に営業（技工士）から確認をさせていただきます。

また、PC画面の送付、またはコピーをお渡しさせていただきます。

②印象の変形、超硬石膏混水比での適合不良（模型に適合している場合）

③セメント合着後の色調違い

④預かりブロックの場合

⑤口腔内調整後の不備（バイト調整・研磨など）

⑥ワックスアップによるダブルスキャンも可能ですが、保証しかねます

*上記以外に関してもその都度ご相談にて対応させていただきます

《推奨材料について》

- ・形成・・・(株)ジーシー ダイヤモンドバー
- ・超硬石膏・・・(株)クレスト スーパーハードロック
- ・セラミック接着用プライマー・・・(株)ジーシー セラミックプライマーII
- ・セメント・・・上記記載
- ・研磨（仕上げ含む）・・・(株)ジーシー ダイヤポリッシャーペースト

敬具